

IDENTIGENE®

TEST ASSURED™

Instrucciones Prueba de ADN de Paternidad

Contenido del kit:


- 3 paquetes de hisopos (cotonetes)
- 3 sobres para las muestras
- 1 hoja de pedido
- 1 sobre con franqueo pagado

Este kit es para un presunto padre y un hijo.
Se incluyen materiales adicionales para la madre, si se desea.

- 3** Utilice 3 hisopos para cada persona.

Frote el interior de la mejia por lo menos 20 segundos.

Ponga los hisopos directamente en el sobre de muestras.

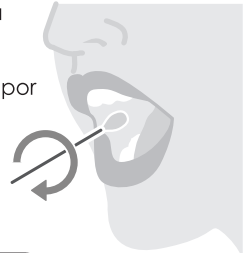

No coma ni beba nada durante una hora antes de coleccionar sus muestras (incluyendo los niños pequeños que están amamantando).

Instrucciones

- 1** Complete la hoja de pedido.



Una contraseña es NECESARIA. Sin una contraseña, no podemos dar ninguna información de la prueba por teléfono o por internet.

- 2** Complete un sobre de muestras para el presunto padre y otro para el hijo. Complete un sobre de muestras para la madre, si lo desea (carga adicional de \$30).

Formulario de pedido de muestra con campos para nombre, dirección y fecha. El formulario incluye instrucciones y un espacio para la firma. Se muestra un ejemplo de una madre con el nombre "Susan R. Jackson" y la fecha "02/26/2008".

- 4** Después de que llene la hoja de pedido con información de pago, coloque la hoja, el pago y las muestras dentro del sobre pre-pagado y envíelo por correo a **IDENTIGENE**.

- 5** Obtenga resultados en línea en **DNAtesting.com** o por teléfono al 1-888-404-4363.



**¿Tiene alguna pregunta?
Estamos aquí para ayudarle.**

Llámenos **1-888-404-4363** Lunes - Viernes de 9 am a las 6 pm ET, o visite nuestro sitio web en **DNAtesting.com**

Preguntas Más Frecuentes

P. ¿Qué tan exactos son los resultados de las pruebas de ADN de paternidad?

R. **IDENTIGENE** garantiza 100% resultados precisos. Los resultados incluyen la probabilidad de paternidad del presunto padre y el hijo.

P. ¿Son estos resultados admisibles en la corte?

R. Para resultados admisibles en la corte, una tercera persona (colector/testigo) debe verificar su identificación y ser testigos de la toma de muestras. Si necesita una prueba para propósitos legales, por favor llámenos y nosotros haremos los arreglos necesarios por usted. Aplican cargos adicionales.

P. ¿Qué edad debe tener el hijo?

R. El hijo puede tener cualquier edad. Cuando se usa según las instrucciones, los hisopos son incluso seguros para los bebés.

P. ¿Debe la madre biológica participar en la prueba?

R. No es obligatorio que la madre biológica participe. Sin embargo, por un pago adicional, usted puede utilizar el material proporcionado y añadir la madre biológica del niño para la prueba.

P. ¿Si la madre no participa en la prueba, puede ella obtener resultados?

R. Sí. La madre pudiera obtener resultados al proporcionar una copia de certificado de nacimiento del niño (ella debe aparecer como la madre) y una copia de su identificación.

Nota: Cualquiera de los padres o el tutor legal del niño pueden solicitar el acceso a los resultados de la prueba.

P. ¿Qué pasa si dos presuntos padres tienen parentesco?

R. Para resultados más conclusos se deben tener muestras de ambos supuestos padres e incluir a la madre biológica también. Si los dos presuntos padres no pueden, asegúrese de informar al laboratorio de que hay un segundo, y relacionado con el presunto padre que no está en la prueba.

P. ¿Cuál es la manera más rápida de obtener resultados?

R. Si usted necesita sus resultados de inmediato, seleccione el procesamiento rápido de 1-Día en la hoja de pedido (cargo adicional de \$30) y envíe sus muestras a través de FedEx ó UPS a:

IDENTIGENE®

2495 South West Temple
Salt Lake City, UT 84115

Nota: Los envíos recibidos después de las 4 PM ET se procesan al día siguiente. No se aceptan entregas de fin de semana.



**¿Más preguntas?
Visite DNAtesting.com**

Visita DNAtesting.com para más preguntas frecuentes, videos instructivos y las historias de clientes reales

1-888-404-4363

Monday - Friday, 9 AM to 6 PM ET

