

IDENTIGENE®

TEST ASSURED™

Instrucciones Prueba de ADN de Paternidad

PARA LOS RESIDENTES DE NUEVA YORK



No rompa el sello de seguridad! El contenido del kit debe ser abierto solo por el colector.

Contenido del Kit:

- 3 paquetes de hisopos (cotonetes) de la mejilla
- 3 sobres para las muestras
- 3 formularios Cadena de Custodia
- 1 hoja de pedido
- 1 sobre con franqueo pagado

Este Kit es para un presunto padre y un hijo.

Se incluyen materiales adicionales para la madre, si se desea.

Instrucciones

- 1 Complete la hoja de pedido y obtenga autorización para la prueba (cargos adicionales por autorización pudieran aplicar).



En Nueva York, las pruebas de paternidad deben ser autorizadas por un médico o un abogado. IDENTIGENE puede ayudarle a localizar uno en su área.

DNA Testing Authorization / Autorización de la Prueba ADN
This section must be completed by a doctor or lawyer licensed in New York State.

Name: [Grid]
Address: [Grid] City: [Grid] State: [Grid] Zip: [Grid]

NEW YORK STATE LICENSE NUMBER: [Grid]

Select One: MD/DO JD

Signature: [Line] Date: [Line]

1-888-404-4363 Mon-Fri 9a-8p ET • DNAtesting.com

2

Llame IDENTIGENE para una cita de colección de muestras (*aplican cargos adicionales*).



La colección de muestras debe ser presenciada por una tercera persona o testigo (colector).

3

Vaya a su cita para coleccionar sus muestras.

Traiga una identificación con foto (emitida por un gobierno) para cada persona. Para los niños, traiga una fotografía clara reciente.



Esperar al menos una hora después de haber comido o bebido antes de utilizar los hisopos (incluyendo niños pequeños que están amamantando).

4

El colector debe enviar todas las muestras y las formas (con su pago del laboratorio) directamente a IDENTIGENE.

5

Usted podrá obtener resultados en línea, vaya a **DNAtesting.com** o por teléfono al 1-888-404-4363.



¿Tiene alguna pregunta?
Estamos aquí para ayudarle.

Llámenos **1-888-404-4363** Lunes - Viernes de 9 am a las 6 pm ET, o visite nuestro sitio web en **DNAtesting.com**

Preguntas Más Frecuentes

P. ¿Qué tan exactos son los resultados de las pruebas de ADN de paternidad?

- R. IDENTIGENE provee 100% resultados precisos garantizados. Los resultados incluyen la probabilidad de paternidad del presunto padre y el hijo.

P. ¿Son estos resultados admisibles en la corte?

- R. Sí. Siempre y cuando su doctor o abogado haya autorizado la prueba, y las muestras hayan sido colectadas y enviadas según las instrucciones provistas; los resultados entonces cumplirían con las pautas requeridas por el estado de Nueva York.

P. ¿Qué edad debe tener el hijo?

- R. El hijo puede tener cualquier edad. Cuando se usa según las instrucciones, los hisopos son incluso seguros para los bebés.

P. ¿Debe la madre biológica participar en la prueba?

- R. No es obligatorio que la madre biológica participe. Sin embargo, por un pago adicional, usted puede utilizar el material proporcionado y añadir la madre biológica del niño para la prueba.

P. ¿Si la madre no participa en la prueba, puede ella obtener resultados?

- R. Sí. La madre puede obtener resultados al proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño (ella debe aparecer como la madre) y una copia de su identificación con fotografía.

Nota: Cualquiera de los padres o el tutor legal del niño pueden solicitar el acceso a los resultados de la prueba.

P. ¿Qué pasa si dos presuntos padres tienen parentesco?

- R. Para resultados más conclusos se deben tener muestras de ambos supuestos padres e incluir a la madre biológica también. Si los dos presuntos padres no pueden, asegúrese de informar a nuestro laboratorio de que hay una segunda, relacionada persona con el presunto padre que no está en la prueba.

P. ¿Cuál es la manera más rápida de obtener resultados?

- R. Si usted necesita sus resultados de inmediato, seleccione el procesamiento rápido de 1-Día en la hoja de pedido (cargo adicional de \$30) y envíe sus muestras a través de FedEx ó UPS a:

IDENTIGENE®
2495 South West Temple
Salt Lake City, UT 84115

Nota: Los envíos recibidos después de las 4 PM ET se procesan al día siguiente. No se aceptan entregas de fin de semana.



**¿Más preguntas?
Visite DNAtesting.com**

Visita DNAtesting.com para más preguntas frecuentes, videos instructivos y las historias de clientes reales.

1-888-404-4363
Monday - Friday, 9 AM to 6 PM ET

